

medi

メディハーモニー

弾性スリーブ ～やわらかさと強さと～

医療機器届出番号：27B1X00123MEDI25



medi. I feel better.


メディハーモニー

mediven® harmony (medi product)
医療機器届出番号: 27B1X00123MEDI25

- ・ご注文の際には、①品番、②カラー、③サイズ、④数量をご明記下さい。
- ・ワイドをご注文の場合、品番の最後にWをつけてください。例 2Z10W
詳細は裏面をご参照ください。

■品番表

スタイル

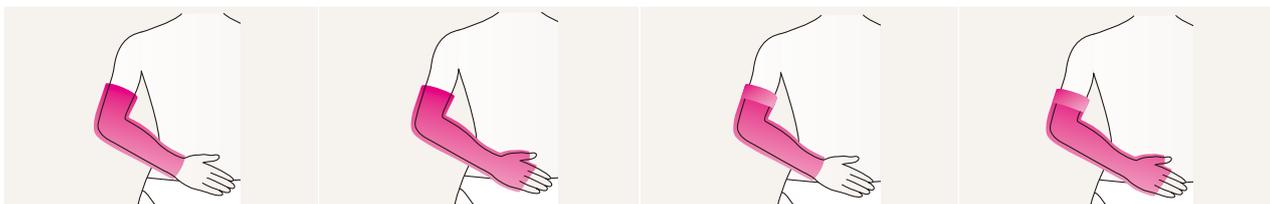


圧迫クラス1 18-21mmHg (2.4-2.8kPa)	スリーブ	ミトン付スリーブ	スリーブ トップバンド付	ミトン付スリーブ トップバンド付
品番	2Y00	2Y10	2Y01	2Y11
(税抜き価格)	(¥8,000)	(¥12,800)	(¥10,000)	(¥15,500)
税込み価格	¥8,640 /枚	¥13,824 /枚	¥10,800 /枚	¥16,740 /枚
圧迫クラス2 23-32mmHg (3.1-4.3kPa)	スリーブ	ミトン付スリーブ	スリーブ トップバンド付	ミトン付スリーブ トップバンド付
品番	2Z00	2Z10	2Z01	2Z11
(税抜き価格)	(¥8,400)	(¥13,200)	(¥10,400)	(¥16,000)
税込み価格	¥9,072 /枚	¥14,256 /枚	¥11,232 /枚	¥17,280 /枚

■サイズ表 (スリーブ各種)

- ・サイズ展開: SS~4L 各サイズにワイドタイプをご用意(価格はスタンダードと同じ)
- ・ワイドをご注文の場合、品番の最後にWをつけてください。例 2Z10W

●周径の採寸

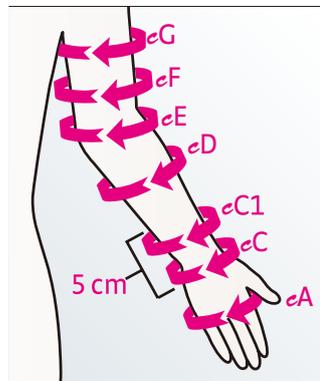

- eG 腋の下の周径(上腕周)
- eF eEとeGの中間の周径
- eE 肘を少し曲げたときの周径(肘周)
- eD 前腕で最も太い部位の周径
- eC1 eCより5cm近位
- eC 最も細い部位の周径(手首周)
- eA 親指以外の4指のつけ根の周径(手背周)


スタンダード

周径 (cm)	SS (I)	S (II)	M (III)	L (IV)	LL (V)	3L (VI)	4L (VII)
eG	25,5-28,0	28,0-30,5	30,0-33,0	32,0-35,0	33,5-36,5	36,0-39,5	38,0-41,5
eF	23,5-25,5	25,0-27,5	27,5-30,0	29,5-32,0	31,0-34,0	33,0-36,0	35,0-38,5
eE	23,0-25,0	24,5-26,5	26,0-28,5	27,5-30,0	29,0-31,5	30,5-33,5	32,5-35,5
eD	22,0-24,0	23,0-25,0	24,0-26,0	25,0-27,5	27,0-29,5	28,5-31,0	30,5-33,5
eC1	15,0-16,5	16,5-18,0	18,0-19,5	19,5-21,0	21,0-23,0	23,0-25,0	25,0-27,5
eC	13,5-14,5	14,5-15,5	16,0-17,5	17,5-19,0	19,0-20,5	20,5-22,5	22,5-24,5
eA	15,0-18,0	16,0-19,0	17,0-20,0	19,0-22,0	20,0-23,0	22,0-25,0	24,0-27,0

ワイド ワイドをご注文の場合、品番の最後にWをつけてください。例 2Z10W (価格はスタンダードと同じ)

周径 (cm)	SS (I)	S (II)	M (III)	L (IV)	LL (V)	3L (VI)	4L (VII)
eG	28,5-31,0	30,5-33,5	33,0-36,0	35,0-38,5	37,0-40,5	39,5-43,0	41,5-45,5
eF	25,5-28,0	27,5-30,0	30,0-33,0	32,0-35,0	34,0-37,0	36,0-39,5	38,5-42,0
eE	24,0-26,0	26,5-29,0	28,5-31,0	30,0-33,0	31,5-34,5	33,5-36,5	35,5-39,0
eD	24,0-26,0	25,0-27,5	26,0-28,5	28,0-30,5	29,5-32,0	31,0-34,0	33,5-36,5
eC1	15,0-16,5	16,5-18,0	18,0-19,5	19,5-21,0	21,0-23,0	23,0-25,0	25,0-27,5
eC	13,5-14,5	14,5-15,5	16,0-17,5	17,5-19,0	19,0-20,5	20,5-22,5	22,5-24,5
eA	15,0-18,0	16,0-19,0	17,0-20,0	19,0-22,0	20,0-23,0	22,0-25,0	24,0-27,0

●丈の採寸

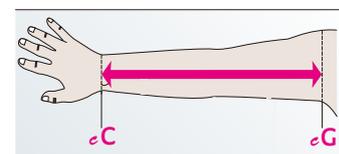

丈 (cm) 手首から上腕まで

e CG 41-47

*メディハーモニーの丈は1種類です。
1つの製品で従来のショート・ロング丈の許容数値をおおよそカバーします。

★編み方：丸編み(ミトン・手袋は平編み)

本価格表の内容は平成26年7月現在のものです。


	サイズ	ワイドタイプ
スリーブ各種	SS~4L	あり(常時在庫対象)
ミトン・手袋	S~4L	なし

*価格はスタンダードと同じ

カラー		
キャメル(#1)	ブラック(#5)	メディベージュ(#8)

*取り寄せ製品

素材	ラテックスフリーです	
圧迫カラス	ポリウレタン	ナイロン
圧1	34%	66%
圧2	43%	57%

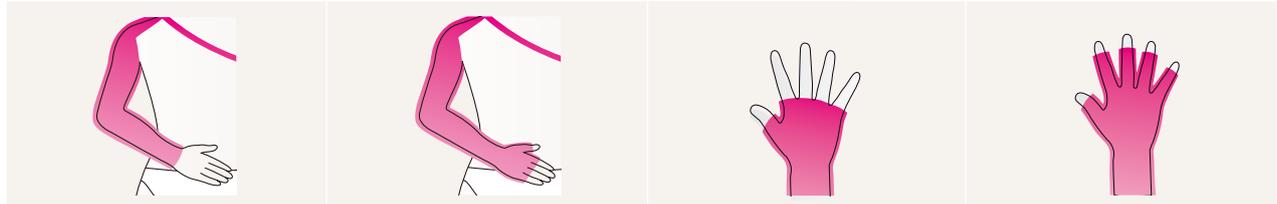


ミトン・手袋にワイドタイプはございません。


スリーブ ショルダーキャップ&ベルト付	ミトン付スリーブ ショルダーキャップ&ベルト付	ミトン	手袋(指加圧タイプ)
2Y05	2Y15	2Y20	2Y21
(¥11,000)	(¥15,500)	(¥8,000)	(¥16,000)
¥11,880/枚	¥16,740/枚	¥8,640/枚	¥17,280/枚
スリーブ ショルダーキャップ&ベルト付	ミトン付スリーブ ショルダーキャップ&ベルト付	ミトン	手袋(指加圧タイプ)
2Z05	2Z15	2Z20	2Z21
(¥11,400)	(¥16,000)	(¥8,000)	(¥17,000)
¥12,312/枚	¥17,280/枚	¥8,640/枚	¥18,360/枚

■サイズ表 (ミトン・手袋) ・サイズ展開：S~4L ミトン・手袋にワイドタイプはございません。

●周径の採寸

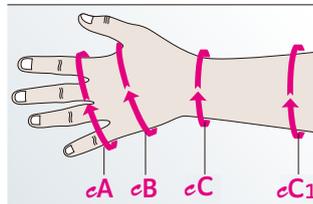

eC1はeCから5cm近位を採寸

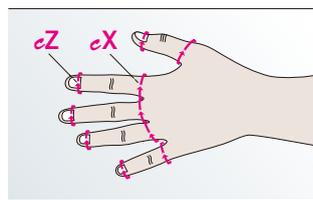

eZは爪床部で採寸
eXは指の付け根で採寸

周径 (cm)

サイズ	S (II)	M (III)	L (IV)	LL (V)	3L (VI)	4L (VII)
eC1	15,0-18,0	17,0-20,0	19,0-21,5	21,0-23,5	23,0-26,0	25,5-30,0
eC	13,5-15,5	15,0-18,0	17,0-20,0	19,0-21,0	20,0-23,5	22,5-27,5
eB	15,5-20,0	17,5-21,0	19,5-23,0	20,5-24,0	22,5-26,0	24,5-30,0
eA	15,0-19,0	17,0-20,0	19,0-22,0	20,0-23,0	22,0-25,0	24,0-29,0


周径 (cm)

5指の周径はあくまでも目安です。この数値から大きくはずれていないかご確認下さい。

サイズ		S (II)	M (III)	L (IV)	LL (V)	3L (VI)	4L (VII)
親指	eX	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	10,0
	eZ	6,0	6,5	6,5	7,0	7,5	8,0
人差し指	eX	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,5
	eZ	5,0	5,5	6,0	6,0	6,5	7,0
中指	eX	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,5
	eZ	5,0	5,5	6,0	6,0	6,5	7,0
薬指	eX	6,0	6,5	7,0	7,0	7,5	9,0
	eZ	5,0	5,0	5,5	5,5	6,0	6,5
小指	eX	5,5	6,0	6,0	6,5	7,0	8,0
	eZ	4,5	4,5	5,0	5,0	5,5	6,0


●丈の採寸

丈の許容値はあくまでも目安です。この数値から大きくはずれていないかご確認下さい。

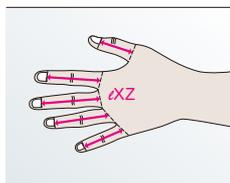

丈/手指 (cm)

親指	3,5-4,5
人差し指	4,5-5,5
中指	5,5-6,5
薬指	4,5-5,5
小指	3,5-4,5

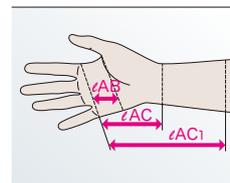

丈 (cm) 全サイズ共通

eAB	3,5-4,5
eAC	10,0-12,0
eAC1	15,0-16,0

●楕円形加工(ダブルエリプス)

肘の内側・外側の2か所の楕円形加工は、肘周囲のしわの形成をおさえ、肘の屈伸時に生じる負担を軽減します。




肘の内側



肘の外側

●お肌にやさしく、伸縮性にすぐれた生地

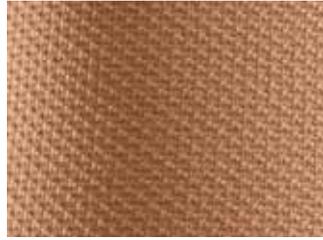

- ・柔らかく快適な着け心地です。ラノリンが含まれ、お肌にもやさしい生地です。
- ・メディハーモニーは、より伸縮性にすぐれた生地を使用しています。1つの製品で、従来のショート・ロング丈許容数値を、おおよそカバーします。

メディハーモニーの装着方法

ステップ1

スリーブの上部をあらかじめ手首の部分まで裏返して、スリーブ先端を手首にあわせませす。



ステップ2

裏返した部分を少しずつ引き上げます。引き上げは肘の楕円形加工部分が肘関節の内・外側に重なるよう調整しながら行います。



ステップ3

全体的にしわ、たるみがないことを確認しながら、最終的にわきの下まで引き上げてください。



●細部まで着け心地の良さを追求

ミトン部のシームを薄く仕上げ、着け心地の向上を図りました。トップバンド部のシームも同様に、薄く仕上げています。



ミトン付スリーブのミトン部



トップバンド

●使いやすさ

メディハーモニーは、より身体のラインに沿うようデザインし、幅広のワイドタイプもご用意しました。それによって、よりフィットする製品を選びやすくなりました。



ご使用について

- ・着用の際は、必ず医師にご相談ください。
- ・製品に付属する添付文書、およびご使用のしおりもよくお読みください。
- ・製品の仕様、外観は改良などの理由により、予告なしに変更することがあります。
- ・印刷物と実際の製品の色は異なる場合があります。
- ・採寸は各部位の寸法が安定した状態で測定してください。
- ・手首周が製品サイズ選定の基準となります。

取扱店

株式会社ほほほ

大阪府泉大津市虫取町一丁目8番1号

フリーダイヤル 0120-119-204

TEL 0725-51-7176

FAX 0725-32-3869

Web <http://www.hohoho-care.com/>

E-mail hohoho-info@hohoho-care.com

ご注文の方法

- ・ご注文の際には、①品番、②カラー、③サイズ、④数量をご明記下さい。



- ①圧迫クラスとスタイルから品番を選びます。
例：2Y00

圧迫クラス1 18-21mmHg (2.4-2.8kPa)	スリーブ
品番	2Y00
(税抜き価格)	(¥8,000)
税込み価格	¥8,640/枚

- ②サイズ表からご自身にあったサイズを選びます。
例：Sサイズ

スタンダード

周径 (cm)	SS (I)	S (II)
eG	25.5 - 28.0	28.0 - 30.5
eF	23.5 - 25.0	25.0 - 27.5
eE	23.0 - 25.0	24.5 - 26.5
eD	22.0 - 24.0	23.0 - 25.0
eC1	15.0 - 16.5	16.5 - 18.0
eC	13.5 - 14.5	14.5 - 15.5
eA	15.0 - 18.0	16.0 - 19.0

ワイドタイプをご注文の場合は品番の後ろにWもあわせて表記してください。
例：2Y00W Sサイズ

- ③お好みのカラーを選びます。
例：メディベージュ(#8)
(ブラックは取り寄せ製品です)

カラー
キャメル (#1)
ブラック (#5)
メディベージュ (#8)

- ④数量もご明記ください。

お手入れ方法

- ・液温40℃以下で市販の洗剤を溶かし、洗濯機または手で押し洗いしてください。洗濯機で洗う場合は、洗濯ネットをご使用ください。
- ・柔軟剤や漂白剤、ベンジン等の使用、ドライクリーニング、アイロンがけはしないでください。
- ・洗濯時に多少脱色する場合がありますので、他の洗濯物との混入は避けてください。
- ・ペルクロテープ (マジックテープ) は留めた状態で洗濯してください。

製造販売元：ナック商会株式会社

第1種医療機器
製造販売業許可番号：27B1X00123
URL：www.nakcorp.co.jp

■大阪本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀5-7-13
(製造販売)

■東京オフィス 〒165-0026 東京都中野区新井5-2-2-8